

MEDIDOR DE GLUCOSA EN SANGRE

RESEÑA DEL SISTEMA



GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS -- Lea su Manual de Usuario para obtener información completa sobre solución de problemas e información de errores.

Código de Error	Lo que significa	Lo que debe hacer
E 1	Se aplicó sangre o solución de control a la tira reactiva antes de que la gota aparezca parpadeando en la pantalla.	Deseche la tira reactiva y repita el análisis con una nueva. Espere hasta que vea la gota de sangre parpadeando en la pantalla antes de realizar el análisis.
E 2	El medidor está detectando una tira reactiva usada o contaminada.	Deseche la tira reactiva y repita el análisis con una nueva. Espere hasta que vea la gota de sangre parpadeando en la pantalla antes de realizar el análisis.
E 3	Tira reactiva incorrecta.	Deseche la tira reactiva y repita el análisis con una nueva. Asegúrese de que está usando una tira reactiva de RPM PRO.
E 4	Muestra incorrecta.	Deseche la tira reactiva y repita el análisis con una nueva. Asegúrese de que solo se esté usando sangre humana capilar y la solución de control de RPM PRO para el análisis.
E 5	La temperatura está fuera de rango.	Muévase a una zona que esté dentro del rango de funcionamiento del medidor. Deje que el medidor se ajuste a esta temperatura durante 20 minutos antes de realizar un análisis.
E 6 E 7	Posible error del dispositivo.	Reinicie el medidor. Si el problema continúa, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de RPM PRO al 866-326-1313, de lunes a viernes, de 8:30 AM-4:30 PM (hora central). Para asuntos urgentes, comuníquese con su profesional de atención médica.
E 8	Se insertó una tira reactiva mientras el medidor estaba conectado a una computadora o a un tomacorriente.	Cuando la carga esté completa (alrededor de 3 horas para cargar una batería vacía), retire el cable USB del medidor y realice un análisis.
E 10	Muestra insuficiente.	Repita el análisis y aplique suficiente muestra para llenar la ventana de revisión de la tira reactiva.
E 11	Se está quedando sin batería.	Cargue la batería.
⊗	No se transmitieron los datos	Recomendamos moverse a otro punto, como, por ejemplo, cerca de una ventana o una zona con una señal telefónica fuerte. Reinicie el BGM, espere la transmisión de datos y revise después de 10 minutos. Si el problema continúa, comuníquese con el servicio de atención al cliente de RPM PRO al 866-326-1313. Para asuntos urgentes, comuníquese con su profesional de atención médica.
⌵	No hay señal	Reinicie el medidor. Si el problema continúa, comuníquese con el servicio de atención al cliente de RPM PRO al 866-326-1313, de lunes a viernes, de 8:30 AM-4:30 PM (hora central). Para asuntos urgentes, comuníquese con su profesional de atención médica.
HI	El resultado de la prueba está por encima de 600 mg/dL.	Lávese y séquese bien las manos y la zona donde se realiza el análisis. Repita el análisis con el uso de una nueva tira reactiva. Si su resultado todavía parpadea “HI”, comuníquese con su profesional de la salud tan pronto como sea posible.
LO	El resultado de la prueba está por debajo de 20 mg/dL.	Lávese y séquese bien las manos y la zona donde se realiza el análisis. Repita el análisis con el uso de una nueva tira reactiva. Si su resultado todavía parpadea “LO”, comuníquese con su profesional de la salud tan pronto como sea posible.

R.P.M. PRO

MEDIDOR DE GLUCOSA EN LA SANGRE
210-7110CK HABILITADO PARA CELULARES
MODELO: TMB-2282-G
REF: TELEBGM 2282-G

GUÍA DE INICIO RÁPIDO ESPAÑOL



PN:
Fecha de vigencia:

Lea este manual de usuario en su totalidad antes de realizar un análisis de glucosa en sangre. Sólo para uso en un solo paciente. No lo comparta.


TIRA REACTIVA Y DISPOSITIVO DE PUNCIÓN

Extremo del electrodo:

Este extremo se inserta en el puerto de la tira del medidor, hacia arriba, en la dirección de las flechas.

Punta de la muestra:

Donde se extrae la sangre.

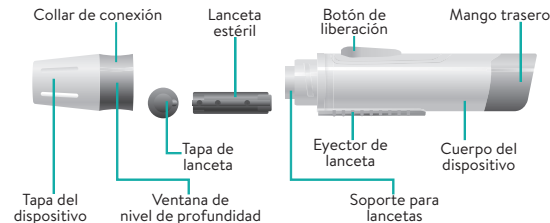

Línea gratuita de ayuda de atención al cliente:
1-866-326-1313

Lunes a Viernes de 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST

Para asuntos urgentes, comuníquese con su profesional de atención médica.

www.veridianhealthcare.com

Distributed by:
Veridian Healthcare
1175 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031
Made in China
#93-2206 04/25
©2025 Veridian Healthcare

PREPARACIÓN DEL DISPOSITIVO DE PUNCIÓN


IMPORTANTE:

Antes de realizar el análisis, limpie la zona donde se realiza el análisis con una gasa embebida en alcohol o agua con jabón. Use agua caliente para aumentar la circulación sanguínea si fuera necesario. Luego límpiase bien las manos y la zona donde se realiza el análisis.

NOTA:


- El medidor y el dispositivo de punción son para uso en un solo paciente.
- ¡No le comparta con nadie, incluidos otros familiares! No lo utilice con distintos pacientes.
- Todas las partes del equipo se consideran de riesgo biológico y posiblemente pueden transmitir enfermedades infecciosas, incluso después de que haya realizado la limpieza y desinfección.
- Debe leer el manual del usuario para ver los procedimientos de limpieza y desinfección.

- Retire la tapa del dispositivo y el collar conector manteniendo y girando el collar en sentido contrario a las agujas del reloj, luego tire. Inserte una lanceta en el soporte de la lanceta deslizándola en él hasta que encaje.

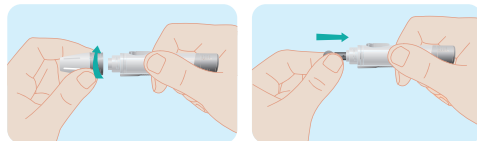


- Desenrosque la tapa de la lanceta.


(Guarde la tapa para sacar la lanceta)

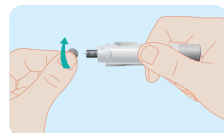


- Coloque nuevamente la tapa y el collar en el dispositivo de punción reajustando y girando en el sentido de las agujas del reloj para ajustarlo.

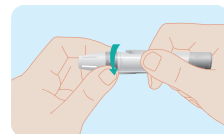

- Sostenga firme el dispositivo de punción y gire la tapa del dispositivo para ajustar la profundidad de penetración de la lanceta. (Elija de las configuraciones 1 hasta la 5 en la ventana de nivel de profundidad.)

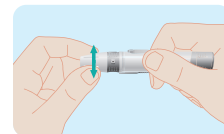

- Tire del mango hasta que escuche un chasquido para cargar el dispositivo de punción.

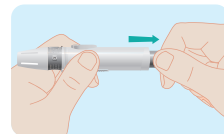

CÓMO REALIZAR UN ANÁLISIS DE GLUCOSA EN SANGRE

- Saque una tira reactiva del frasco de las tiras. Cierre firme la tapa del frasco inmediatamente después de haber sacado la tira reactiva.



- Inserte la tira reactiva en el medidor en la dirección de las flechas. El medidor se enciende automáticamente.

- Aparecerá un símbolo con una gota de sangre parpadeando para hacerle saber que el medidor está listo para el análisis.



- Sostenga el dispositivo de punción contra el costado de la punta del dedo y presione el botón de extracción para pinchar la piel y obtener una gota de sangre.



- Inmediatamente toque la punta de la tira reactiva con la gota de sangre. La sangre debe insertarse en la tira reactiva a través de la punta. No coloque sangre en la parte superior de la tira reactiva.



- El medidor cuenta hasta 5 segundos y luego el resultado de su análisis aparece en la pantalla y automáticamente se almacena en la memoria del medidor.

